



AVISO DE UTILIZAÇÃO




Antes de usar a lâmpada Lili, leia atentamente estas instruções. Guarde-as para consultas futuras, se necessário.

PASSO 1: CARREGUE A LÂMPADA

Antes de usar, carregue a lâmpada por 8 horas usando um carregador USB C 5V/2A.

Um LED vermelho acenderá e ficará verde quando a lâmpada estiver carregada.

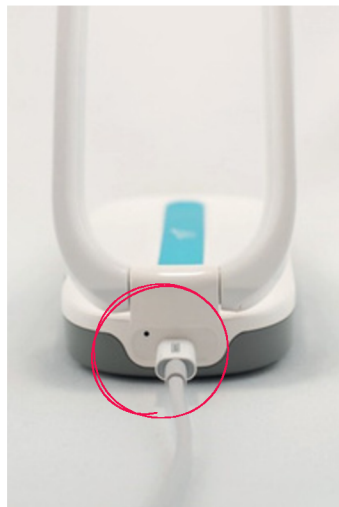

Quando a carga da bateria estiver baixa, a lâmpada começa a piscar.

Na posição MINI a autonomia é de aproximadamente 7 horas.



MÁX.

MÉDIA

MINI

PASSO 2: INSTALANDO O APLICATIVO

Para personalizar as configurações da lâmpada, instale o aplicativo Lili for Life, disponível gratuitamente no Google Play e App Store.

Digitalize o código QR para instalar o aplicativo:




Escaneie-me para instalar



PASSO 3: CONEXÃO E SINCRONIZAÇÃO BLUETOOTH

Assim que a lâmpada estiver carregada:

- Ative o Bluetooth e a geolocalização do smartphone no qual o aplicativo foi baixado
- Abra o aplicativo “LILI”
- Ligue a lâmpada Lili
- Clique em “PESQUISAR”
- Quando "Lili Lamp" aparecer: clique nele

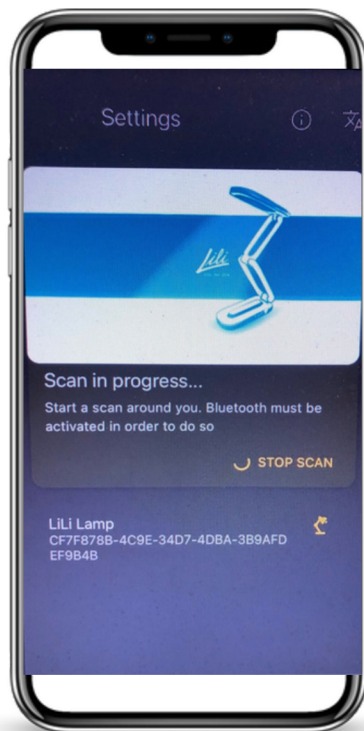

Agora você emparelhou sua lâmpada com seu smartphone.

PASSO 4: AJUSTES DA LÂMPADA (A SEREM FEITOS AOS PARES)

Assim que a lâmpada estiver ligada e emparelhada com o aplicativo, sente-se com um documento impresso. Faça os ajustes acompanhado de uma pessoa de confiança.

1. Escolha um local com iluminação normal (evite luz solar direta).
2. Ajuste a intensidade da luz na lateral da lâmpada: 3 posições estão disponíveis dependendo do seu conforto de leitura:



3. Leia e comunique suas impressões enquanto a outra pessoa ajusta as seguintes configurações no aplicativo:
 - Velocidade (Hertz): A frequência dos flashes de luz.
 - Balanço (%): A duração de extinção dos LEDs em % do tempo de iluminação.
 - Iluminação contínua: Interrompe temporariamente as configurações de velocidade e equilíbrio: a luz torna-se contínua.

- 1 Toque em “Editar”
- 2 Coloque o controle deslizante em 60 Hz e ajuste até que o leitor não perceba mais os flashes de luz.
- 3 A partir desta nova frequência, aumente gradativamente o controle deslizante até encontrar conforto de leitura. Assim que a frequência for encontrada, clique na velocidade para salvar sua escolha



Em seguida, configure: **O equilíbrio**

- 1 Toque em “Editar”.
- 2 Coloque o controle deslizante em 15% e ajuste até que o leitor identifique conforto de leitura.
- 3 Por padrão, defina o saldo para 17%. Assim que a frequência for encontrada, clique em “Balanço” para salvar sua escolha.



Sem avisar o leitor, ative:

Iluminação contínua

- 1 Pergunte a ele sobre suas impressões em relação às configurações anteriores
- 2 Faça o mesmo depois de desligar o modo contínuo.
- 3 Se o leitor identificar um benefício ao retornar à luz pulsada, Lili é eficaz para ele.

Bom trabalho ! Lili salvou suas configurações: você não precisa mais do seu smartphone para usar o Lili.

(PS: não se esqueça de anotar suas configurações de velocidade e equilíbrio se outra pessoa usar sua lâmpada.)

Cerca de 50% dos usuários sentem um efeito imediato. Os outros 30% precisam de múltiplos usos para ver melhorias. (Veja Lili: “Quais benefícios”)

Se quiser ajustar as configurações, reconecte Lili ao aplicativo. E para qualquer dúvida de configuração, entre em contato com o atendimento ao cliente:



+33 (0)2 78 92 00 10



serviceclient@liliforlife.com

Lili: quais são os benefícios?

SEM LILI

Sem Lili a leitura pode ser difícil devido ao efeito de espelho, à duplicação da imagem percebida e à superposição de palavras. “As letras dançam, as linhas se fundem.”

A lâmpada Lili emite luz pulsada. Ao ajustar a velocidade dos flashes da luz e o equilíbrio você terá acesso a um novo conforto de leitura.

COM LÍLI 😊

- Percepção mais contrastada das letras
- Leitura mais fluida e rápida
- Melhor compreensão e concentração
- Autoconfiança e, motivação renovadas
- Fadiga relacionada à leitura reduzida
- Escrita facilitada



PRECAUÇÕES DE USO

Use apenas um carregador USB C com a lâmpada.

Proteja a lâmpada de qualquer fonte de umidade e de qualquer contato com água. Use a lâmpada e seu carregador somente em ambientes internos.

A lâmpada deve ser protegida contra choques e não deve ser exposta a temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

Para evitar danificar a lâmpada Lili, é imprescindível transportá-la no seu estojo protetor.

Contra-indicado para pessoas que sofrem ou podem sofrer crises epiléticas (em caso de dúvida consulte o seu médico).

Não tente abrir a lâmpada ou trocar a bateria sozinho

Um problema ? Duvidas ? Entre em contato com o atendimento ao cliente Lili:



serviceclient@liliforlife.com

Como usar o Lili com telas?

A lâmpada Lili facilita a leitura de pessoas disléxicas em qualquer tipo de tela: tela periférica, laptop, tablet, smartphone, e-reader, etc.

Recomenda-se diminuir o brilho da tela antes de posicionar a lâmpada para melhorar sua eficácia. Você pode ajustar a configuração usando uma das 3 posições de intensidade da lâmpada para encontrar o melhor conforto de leitura.

Ajuste a altura e inclinação das rotações e o ângulo de abertura conforme diagramas abaixo.

Position 1



Position 2



GARANTIA LEGAL DE CONFORMIDADE

Durante uma ação relativa à garantia legal de conformidade, o cliente:

- Beneficia de um período de dois (2) anos a partir da entrega do produto para agir contra o Vendedor
- Pode escolher entre a reparação ou a substituição do bem, sujeitas às condições de custo previstas no artigo L. 217-9 do Código do Consumidor;
- Fica dispensado de comprovar a existência de falta de conformidade dos bens durante os vinte e quatro (24) meses seguintes a entrega dos bens, exceto para bens usados ou “recondicionados”, onde esse prazo é fixado em seis (6) meses.

A garantia legal de conformidade aplica-se independentemente de qualquer garantia comercial concedida. A implementação da garantia é gratuita.

Você pode decidir implementar a garantia contra defeitos ocultos na coisa vendida na acepção do artigo 1641.º do Código Civil e, neste caso, pode escolher entre a anulação da venda ou a redução do preço nos termos do artigo 1.644 do Código Civil. A ação resultante de defeitos ocultos deverá ser instaurada no prazo de dois (2) anos a partir da descoberta do defeito.

Para usufruir da garantia, você deve notificar a Lili for Life por e-mail assim que notar os defeitos atribuídos ao produto. Qualquer devolução de produto deverá estar sujeita a acordo prévio da Lili por email:



serviceclient@liliforlife.com



Este dispositivo deve ser descartado separadamente de outros resíduos. Recicle a lâmpada de acordo com as normas vigentes para componentes eletrônicos e elétricos.